


G-JET® Button



Kombinierte Dünndarm-Magensonde für die Gastrostomie

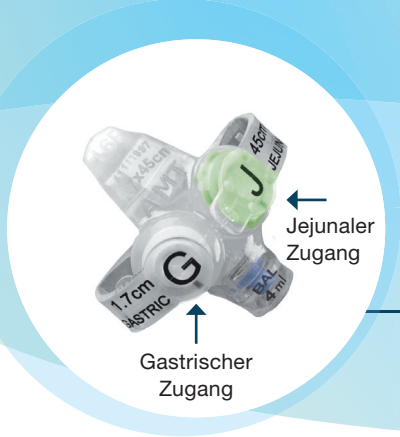


Klare Markierungen

Verwechslungssicher durch unterschiedliche Anschlussformen von J- und G-Port



Glow Green™ J-Port

Für die Anwendung bei Nacht

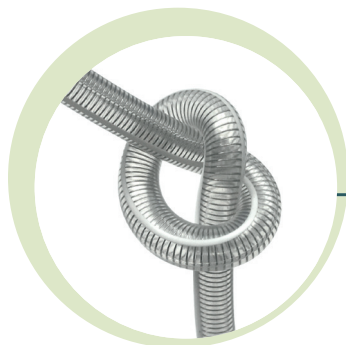

Knickschutz (16 + 18 Fr)

MRT-fähige Spiralverstärkung verhindert ein Abknicken und ermöglicht optimalen Durchfluss



Apfelförmiger Ballon


Eine große Fläche wird bedeckt und das Stoma wird optimal abgedichtet

Röntgenstreifen

Zur einfachen Identifikation beim Röntgen

Mehr Sicherheit

Die versehentliche Zuführung von Nahrung in den Magen (statt in das Jejunum) kann ein Risiko bedeuten. Die G-JET® Zugänge (gastrisch und jejunale) können durch unterschiedliche Anschlussformen nicht verwechselt werden. **Das Risiko von Fehlverbindungen wird reduziert.** Für jeden Port sind unterschiedliche Ernährungs-/Verlängerungssets erforderlich.

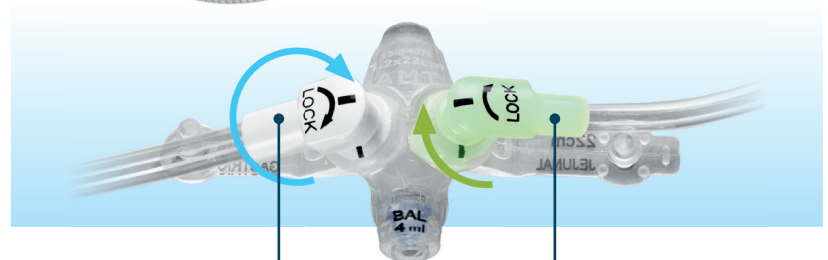

Weißer G-Port


3/4 Drehung im Uhrzeigersinn zum Verbinden mit **gastrischem Verlängerungsset (weiß)**

Glow Green™ J-Port

1/4 Drehung im Uhrzeigersinn zum Verbinden mit **jejunalem Verlängerungsset (Glow Green™)**

Was macht den G-JET® so besonders?

Beim G-JET® wurden die **Bedürfnisse der Patienten weiter in den Vordergrund gestellt**, sodass trotz Stoma eine hohe Lebensqualität ermöglicht werden soll.

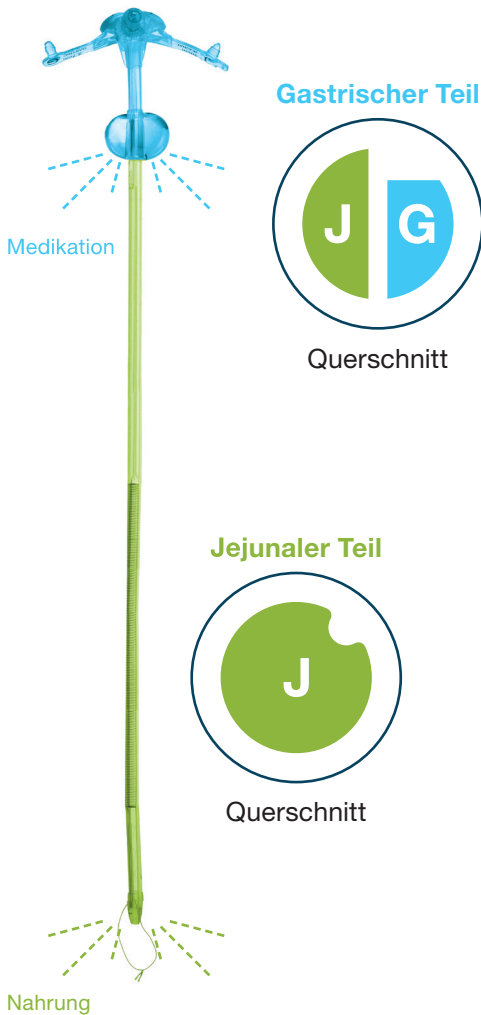

Geringeres Risiko der Sondenverstopfung

Während der G-JET® im gastrischen Teil noch doppelumig ist, wird er im jejunalen Teil einlumig. Dies ermöglicht den bestmöglichen Durchfluss und minimiert das Risiko einer Sondenverstopfung.




Dank des beiliegenden Adapters wird das Einführen des Führungsdrahtes für das Legen des G-Jet® vereinfacht.

Passendes Zubehör

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
4-GW-5	Führungsdraht, 180 cm	10 Stk.
1804	Balloon Stoma Längenmesser, kann mit Führungsdraht verwendet werden	10 Stk.


Die Messung der Stomalänge ist für die richtige Größe und somit optimale Abdichtung sehr wichtig. Wir empfehlen vor jedem Wechsel die Messung der Stomalänge, mindestens aber beim Wechsel von einem anderen Hersteller auf den G-Jet® bzw. bei Größen- oder Gewichtsänderungen.

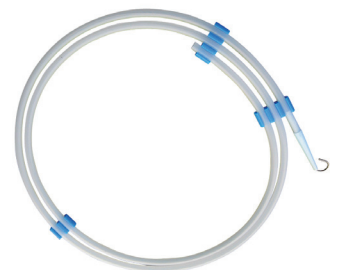

4-GW-5



1804

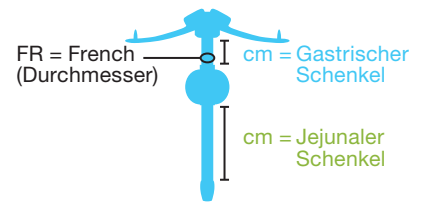

Beispiel: 14 FR x 2,3 cm x 30 cm

Größen und Artikelnummern

14 French				16 French				18 French					
Füllmenge Min. 3 ml Empfohlen 4 ml Max. 5 ml				Füllmenge Min. 3 ml Empfohlen 4 ml Max. 5 ml				Füllmenge Min. 7 ml Empfohlen 8 ml Max. 9 ml					
Gastr. (cm)	Jejunal (cm)	Art.-Nr.	PZN	Gastr. (cm)	Jejunal (cm)	Art.-Nr.	PZN	Länge (cm)	Jejunal (cm)	Art.-Nr.	PZN		
1,0	15	GJ-1410-15-I	14346340	1,0	15	GJ-1610-15-I	14346707						
	22	GJ-1410-22-I	14346357		22	GJ-1610-22-I	14346713						
1,2	15	GJ-1412-15-I	14346363	1,2	15	GJ-1612-15-I	14346742	1,2	22	GJ-1812-22-I	14347084		
	22	GJ-1412-22-I	14346386		22	GJ-1612-22-I	14346759			30	GJ-1812-30-I	14347090	
	30	GJ-1412-30-I	14346400		30	GJ-1612-30-I	14346765						
1,5	15	GJ-1415-15-I	14346417	1,5	15	GJ-1615-15-I	14346771	1,5	22	GJ-1815-22-I	14347109		
	22	GJ-1415-22-I	14346423		22	GJ-1615-22-I	14346788			30	GJ-1815-30-I	14347121	
	30	GJ-1415-30-I	14346452		30	GJ-1615-30-I	14346794				45	GJ-1815-45-I	14347138
	45	GJ-1415-45-I	14346469		45	GJ-1615-45-I	14346802						
1,7	15	GJ-1417-15-I	14346475	1,7	15	GJ-1617-15-I	14346819	1,7	22	GJ-1817-22-I	14347144		
	22	GJ-1417-22-I	14346481		22	GJ-1617-22-I	14346825			30	GJ-1817-30-I	14347150	
	30	GJ-1417-30-I	14346498		30	GJ-1617-30-I	14346831				45	GJ-1817-45-I	14347167
	45	GJ-1417-45-I	14346506		45	GJ-1617-45-I	14346848						
2,0	22	GJ-1420-22-I	14346512	2,0	22	GJ-1620-22-I	14346854	2,0	22	GJ-1820-22-I	14347173		
	30	GJ-1420-30-I	14346529		30	GJ-1620-30-I	14346860			30	GJ-1820-30-I	14347196	
	45	GJ-1420-45-I	14346535		45	GJ-1620-45-I	14346877				45	GJ-1820-45-I	14347204
2,3	30	GJ-1423-30-I	14346541	2,3	30	GJ-1623-30-I	14346883	2,3	30	GJ-1823-30-I	14347210		
	45	GJ-1423-45-I	14346558		45	GJ-1623-45-I	14346908			45	GJ-1823-45-I	14347227	
2,5	30	GJ-1425-30-I	14346564	2,5	30	GJ-1625-30-I	14346914	2,5	30	GJ-1825-30-I	14347233		
	45	GJ-1425-45-I	14346570		45	GJ-1625-45-I	14346920			45	GJ-1825-45-I	14347256	
2,7	30	GJ-1427-30-I	14346587	2,7	30	GJ-1627-30-I	14346937	2,7	30	GJ-1827-30-I	14347262		
	45	GJ-1427-45-I	14346593		45	GJ-1627-45-I	14346943			45	GJ-1827-45-I	14347279	
3,0	45	GJ-1430-45-I	14346601	3,0	45	GJ-1630-45-I	14346966	3,0	45	GJ-1830-45-I	14347285		
3,5	45	GJ-1435-45-I	14346618	3,5	45	GJ-1635-45-I	14346995	3,5	45	GJ-1835-45-I	14347291		
4,0	45	GJ-1440-45-I	14346624	4,0	45	GJ-1640-45-I	14347003	4,0	45	GJ-1840-45-I	14347316		
4,4	45	GJ-1444-45-I	14346630	4,4	45	GJ-1644-45-I	14347026	4,4	45	GJ-1844-45-I	14347322		
5,0	45	GJ-1450-45-I	14346647	5,0	45	GJ-1650-45-I	14347032	5,0	45	GJ-1850-45-I	14347339		
5,5	45	GJ-1455-45-I	14346653	5,5	45	GJ-1655-45-I	14347049	5,5	45	GJ-1855-45-I	14347345		
6,0	45	GJ-1460-45-I	14346676	6,0	45	GJ-1660-45-I	14347055	6,0	45	GJ-1860-45-I	14347374		

Jedem G-JET® liegen folgende Verlängerungen bei:

- 1 x 8-1255-ISOSAF (Y-ENFit-Anschluss, rechtwinklig, 30 cm, jejunal)
- 1 x 6-1222-ISOSAF (Y-ENFit-Anschluss, rechtwinklig, 30 cm, gastral)









Alternativ gibt es die beiliegenden Verlängerungen auch ohne ENFit®-Anschluss

Beispiel Artikelnummer: GJ-1420-30 (ohne „-I“)

Passende Verlängerungssets

Für den G-JET® werden sowohl Anschlüsse für den gastrischen Zugang als auch für den jejunalen Zugang benötigt.

Jejunale Anschlüsse:







Anschluss		Konnektor Länge							
				Y-ENFit®	Y-Port XL, klar (kein ENFit®)	Y-Port, lila (kein ENFit®)	ENFit®	Bolus (kein ENFit®)	Hybrid (ENFit® + Bolus)
Für jejunalen Anschluss	Rechtwinklig 	5 cm (2")	8-0222-ISOSAF PZN 14345323	8-0222 PZN 14344453	-	-	-	-	
		30 cm (12")	8-1255-ISOSAF PZN 14345151	8-1222 PZN 14344542	8-1255 PZN 14344418	8-1221-ISOSAF PZN 14345240	8-1221 PZN 14344430	8-1255-H PZN 14345211	
			8-1222-ISOSAF* PZN 14345228						
	60 cm (24")	8-2455-ISOSAF PZN 14345168	8-2422 PZN 14344476	8-2455 PZN 14344424	8-2421-ISOSAF PZN 14345257	8-2421 PZN 14344447	8-2455-H PZN 14345263		
		8-2422-ISOSAF* PZN 14345346							
	Gerade 	5 cm (2")	8-0212-ISOSAF PZN 14344878	8-0212 PZN 14344513	-	8-0211-ISOSAF PZN 14347380	8-0211 PZN 14344482	-	
30 cm (12")		8-1212-ISOSAF PZN 14344861	8-1212 PZN 14344536	-	8-1211-ISOSAF PZN 14345174	8-1211 PZN 14344499	-		
60 cm (24")		-	-	-	8-2411-ISOSAF PZN 14345145	8-2411 PZN 14344507	-		

* Größeres inneres Lumen



Verlängerungen die jedem G-JET® Button beigelegt sind

Gastrische Anschlüsse:

Anschluss		Konnektor Länge					
				Y-ENFit®	Y-Port XL, klar (kein ENFit®)	ENFit®	Bolus (kein ENFit®)
Für gastrischen Anschluss	Rechtwinklig 	5 cm (2")	-	-	-	-	-
		30 cm (12")	6-1222-ISOSAF PZN 14345205	6-1222 PZN 14344335	6-1221-ISOSAF PZN 14345292	6-1221 PZN 14344269	
			6-2422-ISOSAF PZN 14344358	6-2422 PZN 14344341	6-2421-ISOSAF PZN 14345317	6-2421 PZN 14344281	
	Gerade 	5 cm (2")	6-0212-ISOSAF PZN 14344370	6-0212 PZN 14344364	6-0211-ISOSAF PZN 14346274	6-0211 PZN 14344401	
		30 cm (12")	6-1212-ISOSAF PZN 14344393	6-1212 PZN 14344387	6-1211-ISOSAF PZN 14345286	6-1211 PZN 14344298	
		60 cm (24")	-	-	6-2411-ISOSAF PZN 14345300	6-2411 PZN 14344306	

Hinweis: Eine Verkaufseinheit enthält 10 Stück. Die Verlängerungssets sind bis zu 2 Wochen nutzbar.